

RF ContrÂge™ DUAL

El UNICO sistema DUAL ALTERNANTE (patente mundial)

Eliminación de la celulitis y la flacidez cutánea (facial y corporal)

La innovadora Radiofrecuencia RF ContrÂge™ DUAL mediante su tecnología dual mono y bipolar alternante, permite alcanzar tanto la dermis profunda como superficial con una sola pieza de mano

LA NUEVA RF CONTRÂGE™ DUAL: ACCIÓN SOBRE LA CELULITIS SUPERFICIAL Y PROFUNDA, Y REDUCCION DE LA GRASA SUBDÉRMICA.


La tecnología DUAL ALTERNANTE

¿Cómo actúa y por qué es eficaz?

¿Por qué es diferente de otros tratamientos corporales de remodelado corporal?

RF ContrÂge™ DUAL: El tratamiento no invasivo para


- Celulitis y adiposidades localizadas (terapia de remodelación corporal no invasiva y no abaltiva)
- Flacidez corporal
- “Lifting facial no invasivo”; doble mentón.
- Tratamiento complementario post liposucción

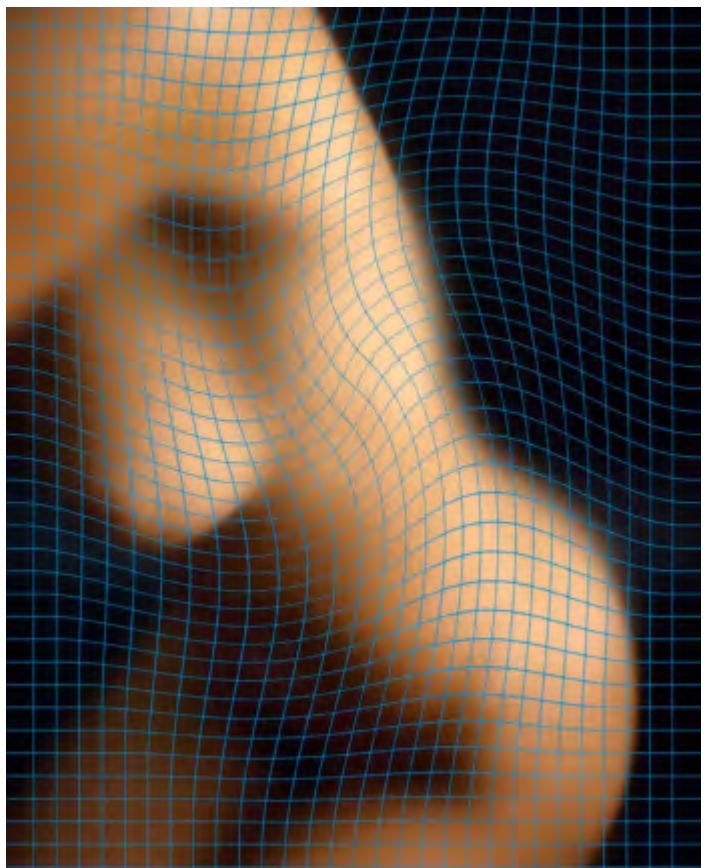

Con la TECNOLOGÍA DUAL Alternante



La UNICA TECNOLOGIA DE RF DUAL ALTERNANTE (patente mundial) que permite adaptar el tratamiento a las necesidades del paciente, definiendo la proporción de acción superficial y profunda.

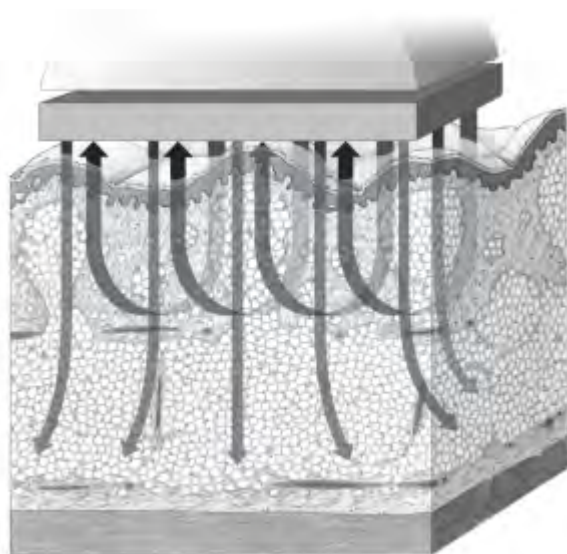

DUAL ALTERANTE: RF monopolar y RF bipolar en una misma aplicación para tratamientos corporales. Con la radiofrecuencia monopolar obtenemos una acción profunda en dermis y en el tejido celular subcutáneo. Con la radiofrecuencia bipolar tenemos una acción dérmica superficial.

Control absoluto de la energía aplicada:

- Tiempo de pulso
- Tiempo total administrado
- Superficie tratada
- Energía real suministrada por superficie
- Proporción de Mono/Bipolaridad

Distribución homogénea de la energía.

Gran rapidez de tratamiento: Dependiendo del área anatómica a tratar, la duración de la sesión puede variar entre 15 minutos (escote) a 50 minutos (espalda).

Máxima fluencia administrada que garantiza verdadero efecto térmico sobre el tejido. Es capaz de entregar altas fluencias de forma controlada y homogénea consiguiendo alcanzar las temperaturas necesarias para asegurar la efectividad de la acción.

Todos estos aspectos hacen que el sistema RF ContrAge™ DUAL sea diferente a cualquier otros sistema de tratamiento de remodelado corporal.

RF ContrAge™ DUAL es capaz de modelar la grasa a la vez que tensa la piel. Esta doble acción se traduce en resultados clínicos visibles, incluso tras la primera sesión. Con las siguientes sesiones será evidente una mejora progresiva, aunque la respuesta inmediata motiva al paciente a seguir y completar el tratamiento.

Estos resultados terapéuticos se obtiene además de forma:

1. No abaltiva
2. No invasiva
3. Segua
4. Confortable y sin molestias
5. Sin baja

¿Cómo trabaja RF ContrAge™ DUAL?

La celulitis puede aparecer tanto a nivel profundo dermis-subdermis o a nivel más superficial. De ahí la ventaja de que un equipo reúna ambas posibilidades de tratamiento (1).

RF ContrAge™ DUAL es capaz de tratar tanto la celulitis más superficial como la más profunda. Este sorprendente y único sistema alcanza ambos niveles de la dermis: la dermis superficial y dermis profunda. Mediante la tecnología DUAL ALTERNANTE se aplican radiofrecuencia monopolar y bipolar.

RF ContrAge™ DUAL está diseñada para calentar uniformemente la dermis a través de la energía RF. El incremento de temperatura causa efectos terapéuticos de interés tanto en la piel como en la grasa:

- **Tersuramiento de la piel:** Contracción y realineación del colágeno y síntesis de nuevo colágeno. El resultado es una piel más firme y de aspecto más joven.



Imágenes cortesía de la Dra. Elvira Ródenas. Madrid, España.

- **Reducción de celulitis y adiposidades localizadas** mediante termolipolisis transdérmica inducida por la energía de la radiofrecuencia. La tecnología RF ContrAge DUAL facilita y potencia la destruc-

ción del tejido adiposo, ayudando su movilización y elimina los depósitos de grasa de forma no invasiva.

- **Efecto bio-estimulador:** Aumenta la circulación sanguínea y promueve la reabsorción y drenaje de fluidos retenidos y toxinas.




Imágenes cortesía del Dr. Campos. Marbella, España.

El tersuramiento o “*efecto tightening*”(2,3): Un efecto directo de este proceso es la desnaturalización parcial del colágeno en forma de contracción inmediata de toda la dermis, sostenida y mantenida en el tiempo por neocolagénesis. Por lo que esta tecnología ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la laxitud cutánea. Siendo un tratamiento no invasivo y natural de eliminación de la flacidez cutánea y renovación de la estructura de sostén de la piel (4,5). Siendo el tratamiento de elección en pacientes que requieren de un tratamiento de “*lifting*” no quirúrgico y sin cambios drásticos. (ya sea en cara como en diferentes áreas del cuerpo).

En las siguientes imágenes podemos observar la evolución de las áreas tratadas.

* Mejora sustancial en los pliegues del ombligo y aumento en la firmeza de la piel en el abdomen. Se observa incluso una mejoría de

las estrias blancas y rosadas en el área que ha sido sometida a la radiofrecuencia.

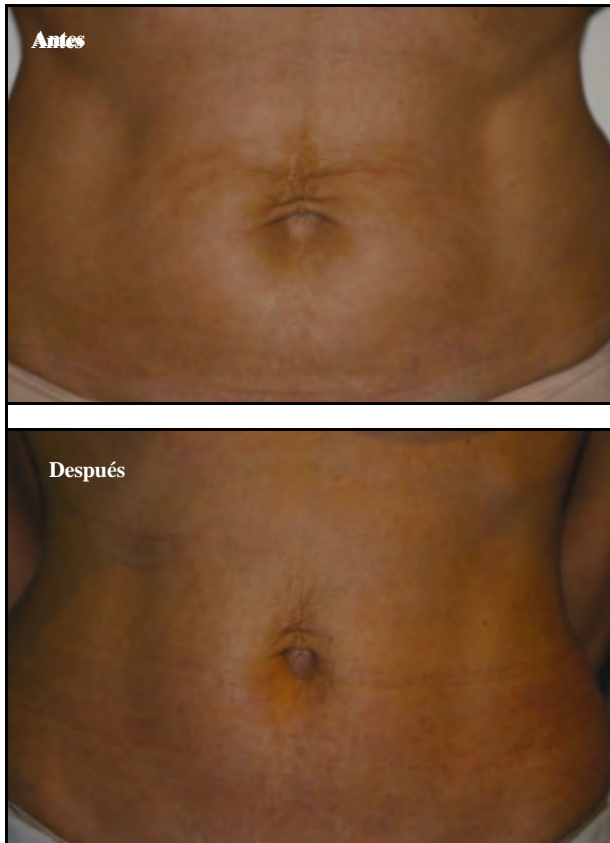

Imágenes cortesía de la Dra. Elvira Ródenas. Madrid. España

El efecto sobre la celulitis y adiposidades localizadas: Se observan resultados medibles y visibles desde la primera sesión: Una piel más lisa (reducción de "piel de naranja"), de apariencia más regular y reducción del perímetro de cadera, muslo y estómago. El protocolo de tratamiento recomendado es de cinco sesiones con intervalos de dos semanas entre sesiones.

1. Dr. Goldberg. "Skin Laser and Surgery of NY and NJ".2006
2. Dr. Zelikson et al. Archives of dermat Feb-04
3. Dr. Cambier et al. Annual meeting European DM society
4. Dra. Ródenas. Sitges 06
5. Dr. Serena. C.Planas 05-Sitges 06



Imágenes cortesía del Dr. Amador Arroyo. Sevilla. España.

RF ContrAge™ DUAL es además compatible con otros tratamientos dermoestéticos y cosméticos.

RF ContrAge™ DUAL



INTERmedic

Oficina central

Avda Josep Tarradellas 91
08029 BARCELONA
ESPAÑA
Tel: +34 902 25 45 45
Fax: +34 902 22 35 35

info@inter-medic.net,
www.inter-medic.net

INTERmedic

Intermedic USA

9233 E. Neville Ave. Unit
1128
Mesa, AZ 85209

PH: +1 4802413795
Fax: +1 4804459903

INTERmedic

Intermedic Europe

Mesplarestraat 37a
9200 Dendermonde
BELGIUM

Tel: + 32 52523554
Fax.: + 32 52202208